

MODELLO 3311 (EX CODICE 3511) – RETRATTORI ELASTICI

Consigliato per le seguenti procedure:

- Urologia
- Chirurgia ginecologica
- Pavimento pelvico
- Chirurgia della mano e del piede
- Chirurgia colorettaile

I VANTAGGI DEI RETRATTORI ELASTICI 3311 LONE STAR

- Colore blu per una facile identificazione
- Confezionati in set da 8 pz. o individualmente
- I retrattori elastici come i punti di sutura, si inseriscono facilmente nelle fessure periferiche dell'anello per divaricazione
- Semplice regolazione della tensione e del posizionamento dei retrattori elastici, durante la procedura chirurgica
- Confezione sterile con una pratica apertura a strappo
- Può essere usato con qualsiasi tipo di anello per divaricazione monouso e poliuso

I retrattori elastici articolo 3311 possono essere usati separatamente o come parte del Sistema di Divaricazione Autostatica Lone Star che include **“Anelli per Divaricazione e Retrattori Elastici”**

COME USARE IL SISTEMA LONE STAR

1. Posizionare l'anello per divaricazione sterile sopra il campo chirurgico
2. La forma dell'anello per divaricazione può essere adattata all'anatomia del campo chirurgico
3. Stabilizzare l'anello, attraverso l'inserimento dei primi due retrattori elastici posizionandoli su due fessure diametralmente opposte
4. Divaricare il margine dell' incisione chirurgica con il retrattore elastico ed allungare l'elastico stesso fino all'estensione desiderata. Va inserito quindi in una fessura dell'anello per bloccarlo
5. Tenere l'anello finché il retrattore elastico opposto non è stato piazzato. Applicare uguale tensione al secondo retrattore elastico in modo che l'anello rimanga centrato sopra il campo chirurgico
6. Altri retrattori elastici possono essere aggiunti in gruppi di due su parti opposte intorno alla zona d'incisione in modo da fornire l'esposizione necessaria
7. I retrattori elastici possono essere mossi o riposizionati, come la procedura chirurgica richiede
8. Lone Star Medical Products offre una varietà di retrattori elastici adatti alla esposizione dei tessuti superficiali e profondi

SCHEDA TECNICA MOD. 3311 (EX CODICE 3511) RETRATTORI ELASTICI

Codici e confezione cod. 3311-8G n° 8 pz. in vaschetta sterile contenuta in un blister con apertura a strappo 3311-1G n° 50 pz. in involucro individuale sterile con apertura a strappo

Imballo, Iscrizioni Blister sterile, contenuto in un box facilmente impilabile ed identificabile, comprensivo di istruzioni per l'uso plurilingue ed etichetta conforme alla normativa CEE 93/42

Marchio commerciale Lone Star Retractor System™

Produttore Cooper Surgical Inc. 95 Corporate Drive, Trumbull, CT 06611 - USA

<http://www.coopersurgical.com>

Composizione, Tossicità Elastico tubolare di silicone, uncino in acciaio inox e resina "NORYL®", per uso "Medical Grade", brevetto General Electric: Atossico

Non contiene lattice

Smaltimento Può essere incenerito senza rischio di residui dannosi

Dimensioni

Lunghezza complessiva 16 cm.

Diametro dell'elastico tubolare 3,3mm.

Diametro interno dell'uncino 3,2mm.

Diametro esterno dell'uncino 5mm.

Modello Retrattore elastico punta acuta

Divaricatori consigliati Tutti gli anelli per divaricazione monouso e poliuso possono essere usati con questo retrattore elastico

Tensione massima Fino a 1,6 kg.

Sterilizzazione Questo prodotto è sterilizzato dal fabbricante con un ciclo ad ossido di etilene

Non può essere risterilizzato in alcun modo

Validità alla consegna Almeno ¾ dai termini della scadenza

Marchio CE CE 2797 certificato n° 69386, rilasciato il 30 agosto 2002.

Classificazione secondo le Direttive 93/42/CE - Questo prodotto appartiene alla classe dei dispositivi medici monouso di classe IIA

CND K01020106

NUMERO REPERTORIO 1085287/R

Brevetti Internazionali 4,274,398 - 4,350,151 - 4,430,991 - 4,434,791 - 4,950,222 - 5,728,041 - 5,769,783 - 5,785,649 - 5,899,853 - 5,964,697 - 5,964,698 - 6,117,072 - 6,190,312